



# MESO

MESO LIFTING THREAD

# TRAX

*Cap*actuel  
MEDICAL

[www.capactuel.com](http://www.capactuel.com)

*Esthétique préventive et réparatrice*

MESO TRAX  
MESO LIFTING THREAD

- ✓ Résultats immédiats
- ✓ Pas d'incisions
- ✓ Peu douloureux
- ✓ Récupération rapide
- ✓ Pas d'effets secondaires

## Le Meso Lifting Thread Mesotrax est une technique peu invasive qui permet d'obtenir une amélioration rapide et naturelle de l'apparence du Visage et Corps.

Le Lifting Thread utilisé est une procédure d'esthétique médicale qui permet un rehaussement et rajeunissement des différentes parties du visage et du corps en utilisant des fils spéciaux sans recours à des incisions chirurgicales. Les fils sont insérés précisément dans les tissus par de fines aiguilles. Ancrés et fixés, ils permettent de lifter et tendre les zones traitées. Les tissus environnants agissent pour maintenir les fils en place et préserver les effets du traitement. Avec la force naturelle de cicatrisation de la peau, due aux micro-blessures causées par le procédé, de nouveaux tissus se forment et relancent la production d'élastine et l'induction naturelle de collagène.

Les traitements sont généralement réalisés sous anesthésie locale assurant ainsi un temps de récupération minimum. La procédure fonctionne parfaitement pour les patients ayant une bonne élasticité des tissus et sans excédent de peau.

Ce processus de lifting par fil est adapté aux hommes ou femmes ne désirant pas recourir à la chirurgie tout en souhaitant maîtriser leur apparence pour se sentir plus jeunes au naturel.

**Les effets constatés durent en moyenne 18 à 24 mois.**

### ■ Certifications.

ISO 13485 - GMP - CE - CE Design



# Capactuel MEDICAL

*Esthétique préventive et réparatrice*

## ✓ Réduction des rides

- Rides du lion
- Onduleuses
- Contour des yeux
- Vallée de larmes
- Sillons nasogéniens
- Plis d'amertume
- Cou

## ✓ Minceur

- Poignées d'amour
- Graisse abdominale

## ✓ Lifting

- Lignes de bajoues
- Double menton
- Contour de visage
- Profilage mandibulaire
- Fesses
- Genoux
- Cuisses

## ✓ Volume

- Joue

## ✓ Involution de muscle

- Mâchoire carrée
- Mollets




## ■ Stimulation mécanique des aiguilles et fils.

Selon l'étude d'HELENE M. LANGEVIN, l'action de l'aiguille et du fil sur le tissu sous-cutané entraîne une mécanotransduction pour un rapide remodelage du cytosquelette. Cette technique exclusive agit jusqu'au derme pour relancer la production naturelle de collagène et d'élastine, stimuler la prolifération des fibroblastes durant le processus de cicatrisation, densifier les tissus fins du visage, du cou et du décolleté. L'activation des fibroblastes est observée en réponse à la rotation de l'aiguille, celle-ci provoquant un enroulement des fibres de collagène et la formation d'un verticille de collagène et fibroblastes dans la zone entourant l'aiguille. Les tissus environnants le fil sont stimulés en continu par les mouvements faciaux jusqu'à la dégradation complète de la suture..

## ■ Lésions tissulaires et processus de guérison des plaies.

Les aiguilles ou canules traversent la peau et implantent les fils dans les tissus. La perforation provoque des dommages tissulaires localisés et des saignements, induisant un processus de cicatrisation immédiat. Les plaquettes sont automatiquement libérées et le processus normal d'inflammation débute, même si la plaie est minuscule. De nombreuses piqûres fines favorisent la libération post-traumatique des facteurs de croissance et conduit à la production de collagène et d'élastine par les fibroblastes.

- Processus naturel de cicatrisation :

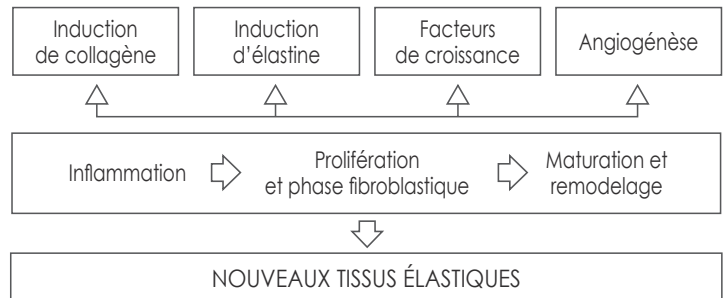

## ■ Positionnement et effets.

Les fils peuvent être implantés dans le derme, la couche sous cutanée ou le muscle. Selon leur implantation, les effets sont : retrait des ridules ou graisse sous cutanée, lifting, détente ou rétractation des muscles, élimination des rides profondes.

Visage ou corps, à chaque objectif, son fils, ses effets.

# MESO TRAX

MESO LIFTING THREAD



## ■ Aiguilles **TWISTED MONO**

Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse légèrement enroulée. Fil standard, c'est le fil le plus utilisé pour le Meso-lifting thread. Il est efficace pour le lifting doux et le rajeunissement. Comparé aux simples sutures mono-filament classiques, le model TWISTED MONO est plus facile à insérer et a un meilleur effet structurant.

Moyeu	Aiguilles		Fils		Nombre de pièces par boîte
	Calibre / Diamètre	Longeur	Epaisseur	Longeur	
Gris	27G / 0.400-0.420mm	60mm	5-0	90mm	100
Rose	29G / 0.324-0.351mm	38mm	6-0	55mm	100
Rose	29G / 0.324-0.351mm	50mm	6-0	75mm	100
Jaune	30G / 0.298-0.320mm	25mm	6-0	30mm	100

1 boîte = 100 pièces = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d'achat par pochettes.

## ■ Aiguilles **SUPER SPRING**

Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse densément enroulée autour de l'aiguille, qui s'étire lorsqu'elle est insérée dans la peau et à la propriété de retrouver sa forme initiale. En raison de son élasticité naturelle, ce fil offre un lifting et un effet tenseur intense pour plus de volume. Un petit nombre de fils peut donc être utilisé pour atteindre un bon résultat. Comparé aux sutures classiques enroulées, le model SUPER SPRING apporte du volume et un meilleur effet liftant.

Moyeu	Aiguilles		Fils		Nombre de pièces par boîte
	Calibre / Diamètre	Longeur	Epaisseur	Longeur	
Rose	29G / 0.324-0.351mm	25mm	6-0	30mm	100
Gris	27G / 0.412-0.413mm	38mm	6-0	55mm	100
Gris	27G / 0.412-0.413mm	50mm	6-0	75mm	100


1 boîte = 100 pièces = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d'achat par pochettes.

## ■ Aiguilles **SPIRAL SHARP COG**

Suture 3D COG mono-filament en polydioxanone à barbillons bi-directionnelles fabriquées à partir de fibre mono-filament par une technique de micro-usinage qui coupe des barbillons à 360° du haut en bas de la suture. Lorsqu'elle est insérée, la suture s'auto-ancrage aux tissus de la peau et maintient le lifting. Le fil reste beaucoup plus stable et l'effet liftant dure plus longtemps. Comparé aux sutures COG classiques le COG MESOTRAX a une excellente qualité d'ancrage et de fixation.

Moyeu	Aiguilles		Fils		Nombre de pièces par boîte
	Calibre / Diamètre	Longeur	Epaisseur	Longeur	
Bleu	23G / 0.600-0.673mm	38mm	3-0	95mm	100
Bleu	23G / 0.600-0.673mm	60mm	3-0	115mm	100
Bleu	23G / 0.600-0.673mm	90mm	3-0	145mm	100

1 boîte = 100 pièces = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d'achat par pochettes.

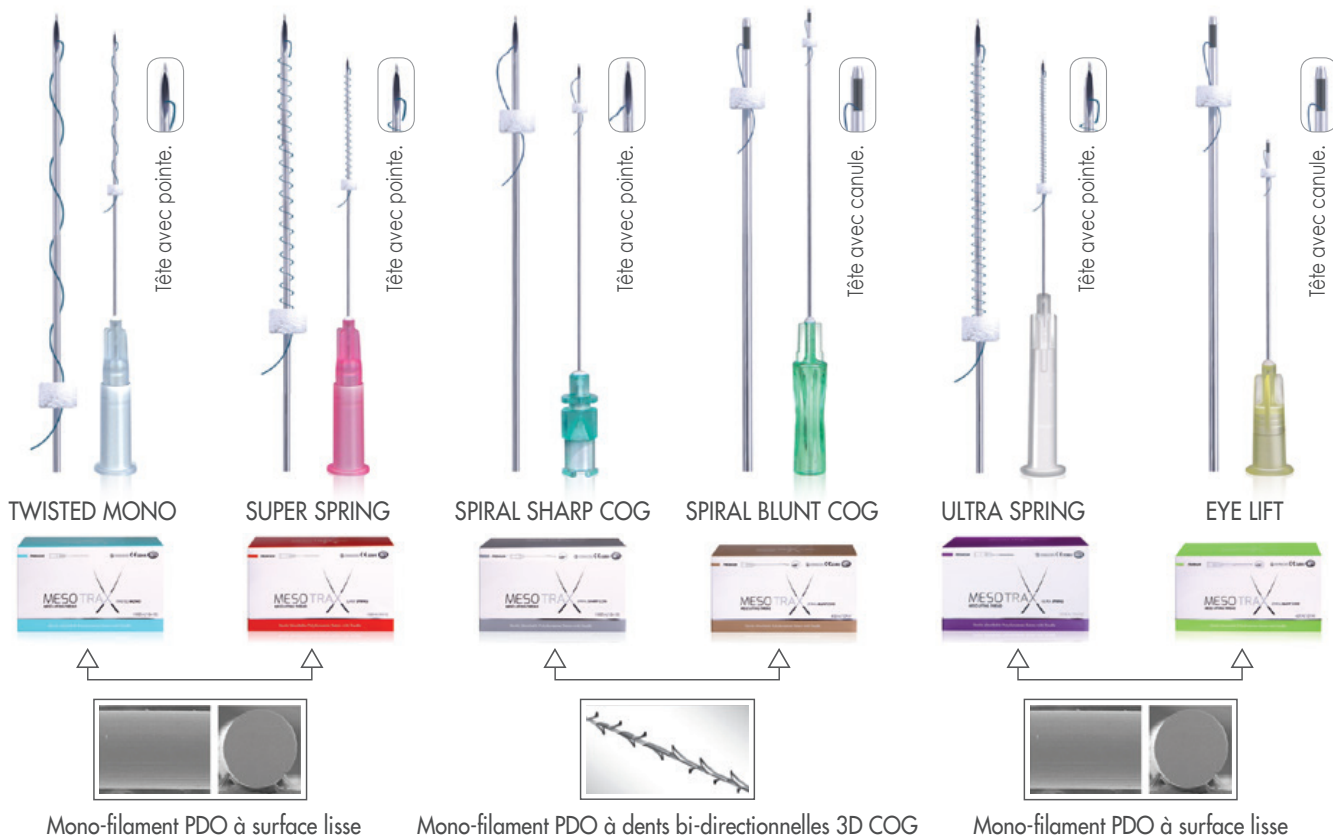

## ■ Canules **SPIRAL BLUNT COG**

Suture 3D COG identique à celle proposée sur le model SPIRAL SHARP. La spécificité réside dans la forme arrondie de la tête de l'aiguille pour l'implantation du fil. Cette spécificité permet de réduire les risques d'ecchymoses et d'offrir une procédure plus confortable et toujours plus sécurisée sur les zones délicates. Ici, un pré-trou est conseillé pour insérer la canule.

Moyeu	Aiguilles		Fils		Nombre de pièces par boîte
	Calibre / Diamètre	Longeur	Epaisseur	Longeur	
Vert	21G / 0.800-0.830mm	60mm	2-0	120mm	40
Vert	21G / 0.800-0.830mm	90mm	2-0	150mm	40
Crème	19G / 1.030-1.100mm	100mm	1-0	160mm	40

1 boîte = 40 pièces = 10 pochettes sous vide contenant 1 sachet de 4 fils. Possibilité d'achat par pochettes.

## ■ Aiguilles **ULTRA SPRING**

Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse intensément enroulée autour de l'aiguille. Il est inséré comme un ressort, ne s'étire que très légèrement pour permettre de garder une surface maximale en contact avec les tissus environnants. Comparé aux sutures classiques enroulées, le model ULTRA SPRING renforce le processus de néo-collagénèse et génère un volume plus intense.

Moyeu	Aiguilles		Fils		Nombre de pièces par boîte
	Calibre / Diamètre	Longueur	Epaisseur	Longueur	
Gris	27G / 0.412~0.413mm	40mm	6-0	100mm	100

1 boîte = 100 pièces = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d'achat par pochettes.

## ■ Canules **EYE LIFT**

Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse. Le calibre et la forme émoussée de l'aiguille sont étudiés pour implanter le fil dans les zones délicates. Ces spécificités permettent de traiter en toute sécurité la région péri-orbitaire sans provoquer de rupture capillaire, minimiser la douleur et réduire les risques d'ecchymoses. Ici, un pré-trou est conseillé pour insérer la canule.





Moyeu	Aiguilles		Fils		Nombre de pièces par boîte
	Calibre / Diamètre	Longueur	Epaisseur	Longueur	
Jaune	30G / 0.298~0.320mm	25mm	6-0	35mm	40

1 boîte = 40 pièces = 10 pochettes sous vide contenant 1 sachet de 4 fils. Possibilité d'achat par pochettes.

## ■ Des aiguilles performantes au-delà de vos espérances.

Canules ou aiguilles à pointes stériles reconnues pour leurs qualités de fabrication et de coupe, Sutures en polydioxanone lisses ou crantées de tailles variées, Critères d'efficacité, fiabilité, maniabilité et sécurité nécessaires aux soins de haute qualité respectés, les produits de la Gamme Innovante Mesotrax sont à même de faciliter le travail du praticien tout en améliorant considérablement le confort du patient.

- Une qualité et efficacité supérieure face aux produits classiques de même catégorie.

	Sutures de type Mono	Sutures de type Enroulé
Produit classiques équivalentes	 Fil PDO Mono classique	 Fil PDO Enroulé classique
<b>Produits MESOTRAX</b>	 Fil MESOTRAX TWISTED MONO	 Fil MESOTRAX SUPER SPRING

- Étapes et effets provoqués suite à la pose de suture Mesotrax.

Juste après	15-30 Jours	~60 Jours	150-200 Jours	200~ Jours
Effet repulpant instantané due à l'œdème.	Effet de cicatrisation des plaies	Poursuite de collagénèse	Dissolution de la suture	Effets structurants et liftants sont prolongés même après la dissolution de la suture,



MESO TRAX  
MESO LIFTING THREAD

*Cap*actuel  
MEDICAL

*Esthétique préventive et réparatrice*

**+ 33 (0)1 48 93 65 53**

contact@capactuel.com [www.capactuel.com](http://www.capactuel.com)